


取扱説明書



メガライトルミビュー
コードレスタイプ

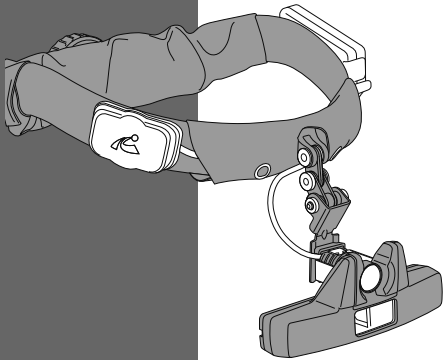

- このたびは、メガライトルミビューコードレスタイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

20・002

各部の名称

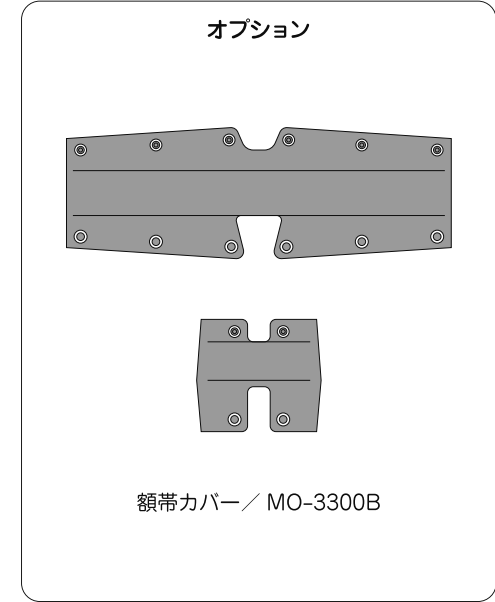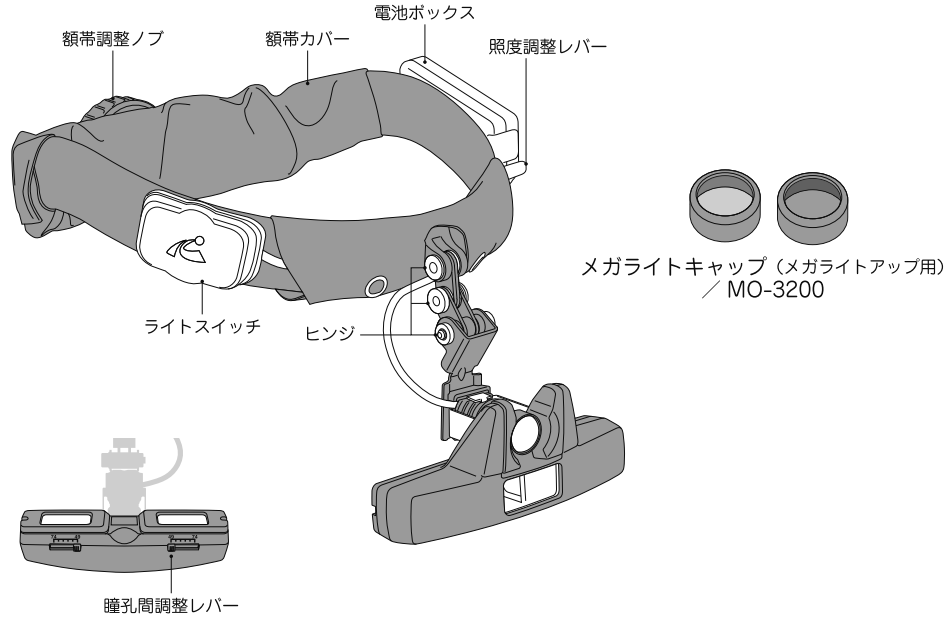

安全上のご注意 必ずお守りください

事故を未然に防ぐため、ご使用前に本書を必ずお読みください。

警告

- 防水構造ではありません。
 - 電気ショックを受ける危険性があります。
 - 水漏れなどが発生した場合は、直ちにスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いたうえで乾燥した布などで十分に拭き取ってください。
 - 内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け、安全が確認されるまでご使用にならないでください。
 - LED周辺部は温かくなります。
 - ライトの角度調整時には注意して行ってください。
 - 光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照射しないでください。
 - 目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります。
 - 皮膚への損傷を最小限とするために、次の事項を守ってください。
 - 皮膚が損傷する危険性があります。
- 1) 照射時間を最小限にしてください。
 - 2) 皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により皮膚感覚が変化している場合は特に注意してください。

禁止

- 本品は可燃性の麻酔ガスなどの状況下では絶対に使用しないでください。
- 爆発の恐れがあります。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 故障の原因となります。
- 本製品は滅菌などの措置は出来ません。
- 故障の原因となります。

※ 付属品などの内容物がそろっていることをご確認ください。
万一、内容物に不足や破損がある場合は、下記までご連絡ください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

株式会社 近藤研究所

TEL 052-859-0505 FAX 052-859-0552
E-mail mega@kondo-labo.co.jp

仕様

型式	ML-510B	
ルーペ	1.5倍	
ルーペ焦点距離	300~400mm	
調光機能	○	
寸法・質量	本体	178W×163D×28H mm (周囲 51~62 cm)・205 g (電池含まず) ルーペ部 111W×28D×47H mm
コード長	コードレス	
電源	単4電池×3本	
光源	3W LED	
照射範囲(距離 350mm)	90~45mm	
バッテリー使用時間	約2時間	
バッテリー充電時間	—	

セット内容

品名	型式	ML-510B
本体	—	●
メガライトキャップ(メガライトアップ用)	MO-3200	●

オプション

品名	型式	備考
額帯カバー	MO-3300B	—

困ったときは・・・

修理・サービスを依頼される前に下記の故障診断にしたがって点検してください。
それでも解決されない場合は、弊社にご相談ください。

- LED が点灯しない、暗い

原因	対策
・電池の接続不良	・電池のセット方向(+・-の向き)を確認する
・電池容量が無い	・電池を充電(交換)する
・調光レバーが下向きになっている	・調光レバーで照度を調整する
・LEDに異常がある	・LEDの交換を依頼する
・照度調整レバーに接触不良がある	・部品交換を依頼する


- LED にチラつきがある

原因	対策
・スイッチやコードに接続不良がある	・部品交換を依頼する

1 額帯部の調整

周囲長さの調整


- 額帯調整ノブを緩め、最適な長さに調整してください。
- 調整後、額帯調整ノブをしっかりと締めてください。

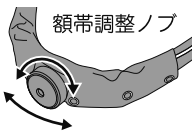

2 電池の交換方法


カバーの取外し

- 2本の溝を押しながらカバーをスライドさせて取外します。

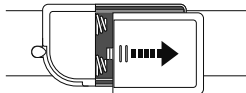


電池をセット

- 単4電池3本を、図のようにセットしてください。

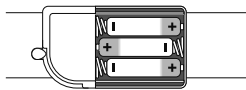

カバーの取付け



- 2本の溝を押しながらカバーをスライドさせて取付けてください。

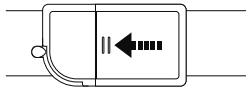

3 電池BOX


照度調整

- 照度調整レバーをスライドさせることでLEDライトの明るさ調整が行えます。

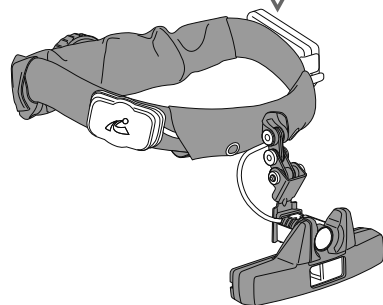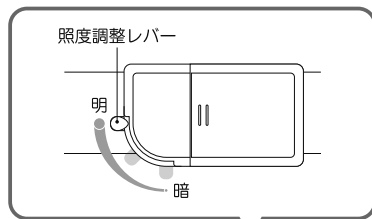

4 ライトのON/OFF


- 額帯部分にあるライトスイッチを押してください。

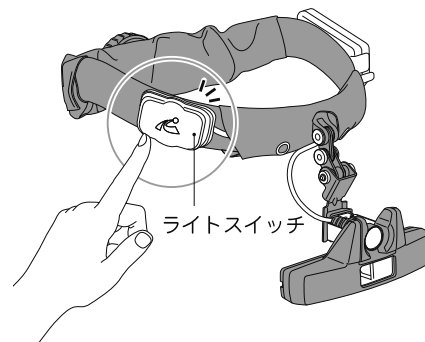


5 照射角度の調整

- ライトは、前後・上下に照射角度の調節ができます。

前後の角度調整

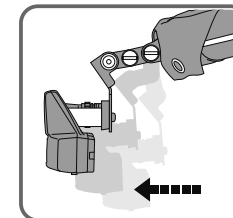


上下の角度調整

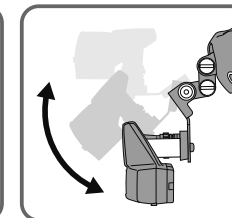


6 可動式ルーペ

- ルーペは可動式で上部に持ち上げればヘッドライトのみでも使用可能です。

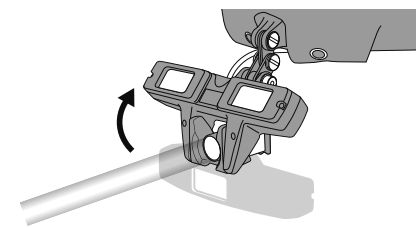

7 瞳孔間の調整


- 瞳孔間調整レバーをスライドさせることで調整できます。(49~74 mm)

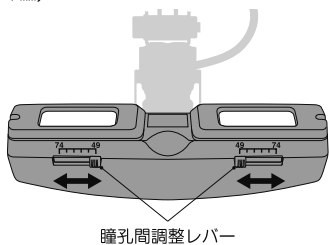

9 ルーペの調整方法


準備

- 約38cm先の対象物を見ながら行ってください。
- ルーペ部分はなるべく近い位置へ調整してください。

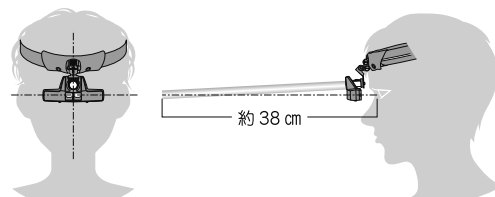

調整前の設定

- 瞳孔間調整レバーを一番外側に合わせ、ライトを点灯します。
- 左右の目で見える視野を「平行」に、境目が「中央」になるようにしてください。

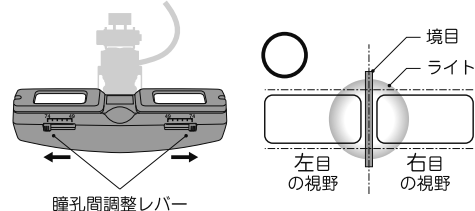


ズレがある場合・・・

● 視野 [上下のズレ]	 ×	 額帯を水平に
● ライト [上下のズレ]	 ×	 ヒンジで ヒンジで 角度調整
● ライト [左右のズレ]	 ×	 額帯を中央に


調整

- 瞳孔間調整レバーで左右の視野が重なるよう調整してください。

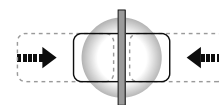


10 照射範囲の調整

- ライト本体の中央部を回すと照射範囲が調整できます。
- 照射範囲：約90~45mm (距離350mm)

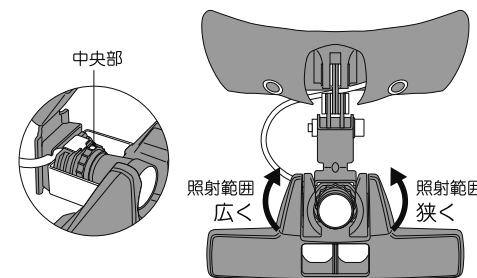

照射範囲

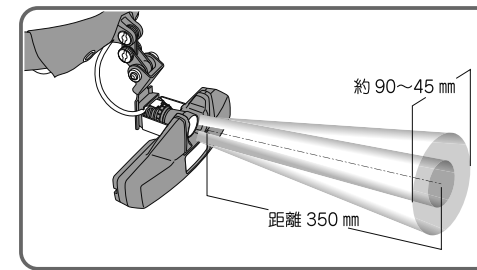

8 メガライトキャップの取付け・取外し

- 矢印の方向にしっかりと差し込んでください。

