


取扱説明書



イルミナ
タッチレスシリーズ

ダブル シングル
MS-701D MS-701S
MS-771D MS-771S
MS-751D MS-751S

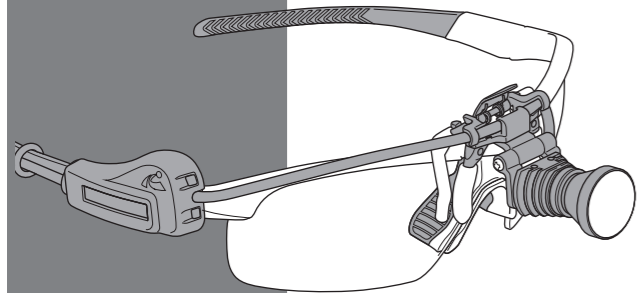

- このたびは、イルミナ タッチレスシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称

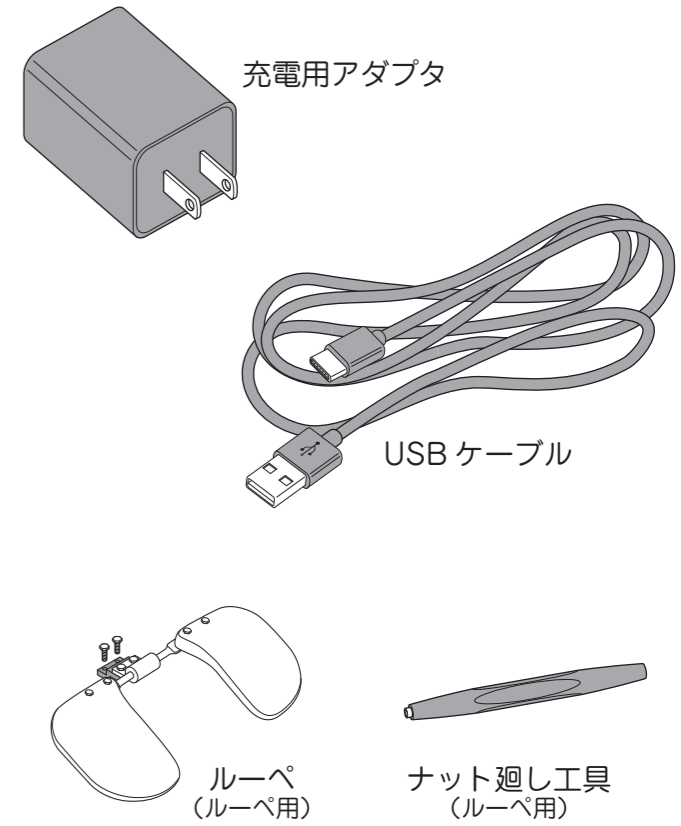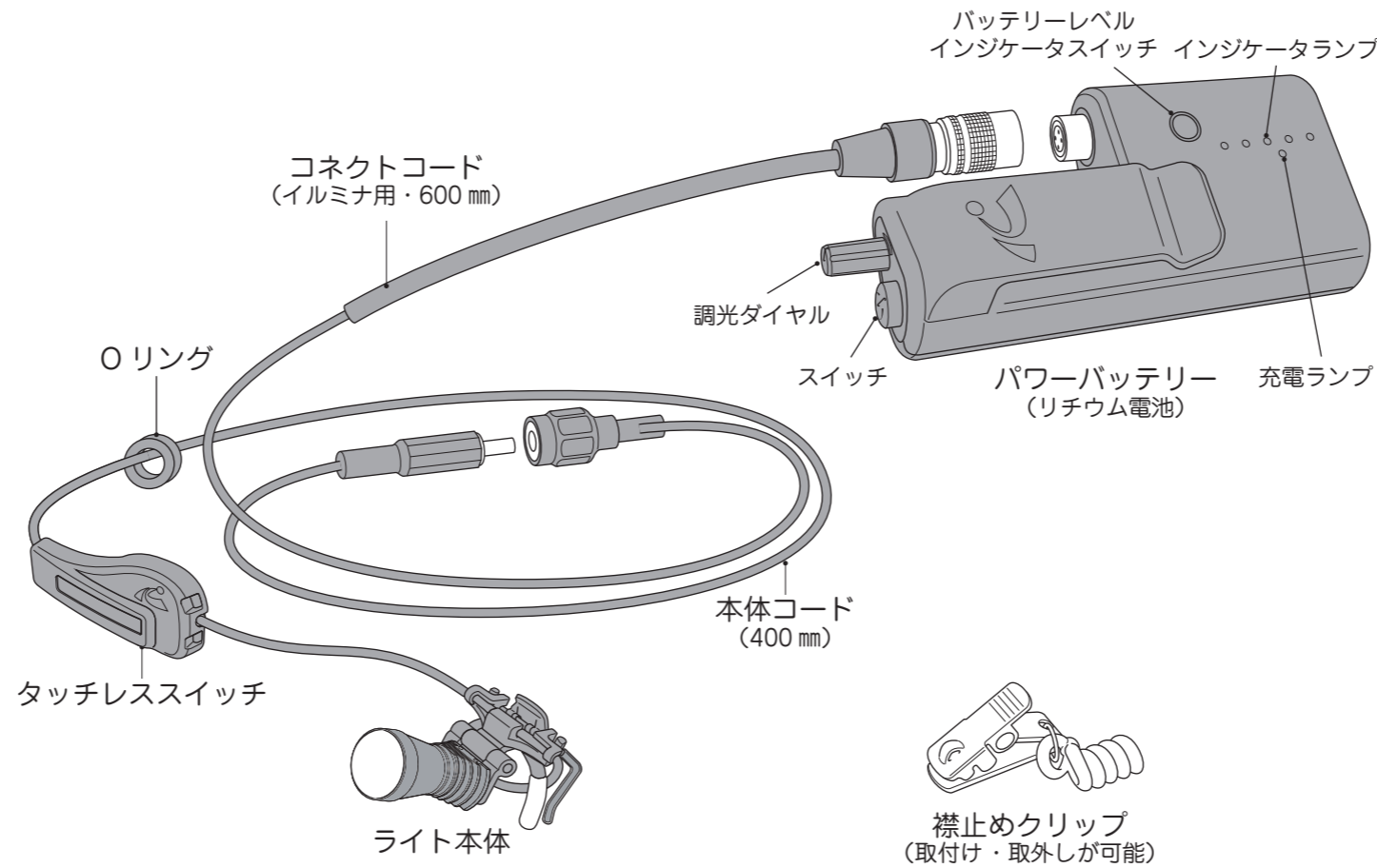

安全上のご注意 必ずお守りください

事故を未然に防ぐため、ご使用前に本書を必ずお読みください。

警告

- 防水構造ではありません。
- 電気ショックを受ける危険性があります。
- 水漏れなどが発生した場合は、直ちにスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いたうえで乾燥した布などで十分に拭き取ってください。
- 内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け、安全が確認されるまでご使用にならないでください。
- LED周辺部は温かくなります。
- ライトの角度調整時には注意して行ってください。
- 光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照射しないでください。
- 目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります。
- 皮膚への損傷を最小限とするために、次の事項を守ってください。
- 皮膚が損傷する危険性があります。
- 1)照射時間を最小限にしてください。
- 2)皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により皮膚感度に変化している場合は特に注意してください。

禁止

- 本品は可燃性の麻酔ガスなどの状況下では絶対に使用しないでください。
- 爆発の恐れがあります。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 故障の原因となります。
- 本製品は滅菌などの措置は出来ません。
- 故障の原因となります。

※ 付属品などの内容物がそろっていることをご確認ください。
万一、内容物に不足や破損がある場合は、下記までご連絡ください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

株式会社 近藤研究所

TEL 052-228-3117 FAX 052-228-3116
E-mail mega@kondo-labo.co.jp

仕様

型式	MS-701D (ダブル)	MS-701S (シングル)	MS-771D (ダブル)	MS-771S (シングル)	MS-751D1 (ダブル)	MS-751S (シングル)
ルーペ (倍率)	—	—	1.7 倍	—	1.5 倍	—
ルーペ焦点距離	—	—	250~300 mm	—	300~400 mm	—
寸法・質量	ライト本体	31W×20D×20H mm・9g	53W×36D×34H mm・28g (クリップ含む)	—	10W×87D×39H mm・8g	—
	ルーペ	—	—	—	—	—
	バッテリー	—	—	104W×48.5D×31H mm・92g	—	—
	充電用アダプタ	—	—	60W×35D×25H mm・35g	—	—
USBケーブル	—	—	—	—	タイプ C 1000mm	—
コード長	1000 mm (本体コード: 400 mm+コネクトコード: 600 mm)					
電源	3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mAh					
光源	3W LED					
照射範囲 (距離 350 mm)	90 mm					
調光機能	照度レベル I~III (無段階)					
照度 (距離 250 mm)	照度 III: 60,000 lux 照度 II: 40,000 lux 照度 I: 30,000 lux					
バッテリー使用時間	照度 III: 240 分 照度 II: 400 分 照度 I: 570 分					
バッテリー充電時間	約 4 時間					

■ セット内容

品名	型式	MS-701D (ダブル)	MS-701S (シングル)	MS-771D (ダブル)	MS-771S (シングル)	MS-751D1 (ダブル)	MS-751S (シングル)
ライト本体	MO-3006D(S)	●	●	●	●	●	●
バッテリー	MS-010A	●	●	●	●	●	●
充電用アダプタ	MS-030A	●	●	●	●	●	●
USBケーブル	MS-040A	●	●	●	●	●	●
コネクトコード (イルミナ用・600mm)	MS-960A	●	●	●	●	●	●
ルーペ 1.7 (拡大倍率 1.7 倍)	MO-3170	—	—	●	●	—	—
ルーペ 1.5 (拡大倍率 1.5 倍)	MO-3150	—	—	—	—	●	●

バッテリーについて

- バッテリーについて：
バッテリー電池は、リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池は継ぎ足し充電をしても、電池の性能を低下させることはありません。
電池の寿命は、およそ充放電 500 回が目安です。
フル充電しても使用可能時間が極端に短くなった場合は、電池寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により大きく変化します。)


バッテリーの配置

- バッテリーを配置する際は、コードを一度首の後ろを通していただくとうとライトの重さが軽減され安定します。
- 付属の襟止めクリップを使用していただくとうとコードが邪魔になりません。




1 ライトの取付け

- ライト本体部のクリップ部を広げ、メガネ・ゴーグル等のレンズを挟み込むように取付けてください。

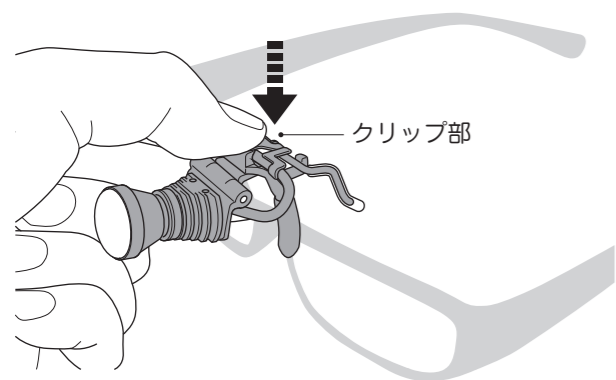

注意


- クリップ部分のツマミを逆に広げると破損の原因となります。

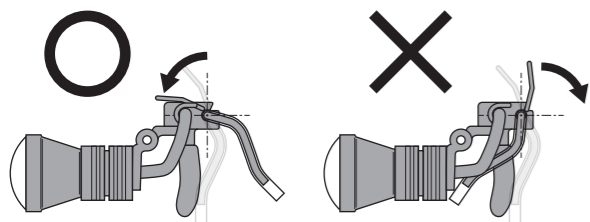

2 タッチレススイッチとコードの固定


タッチレススイッチ

- 固定ネジ2本で、タッチレススイッチをフレームに固定してください。(予備2本)

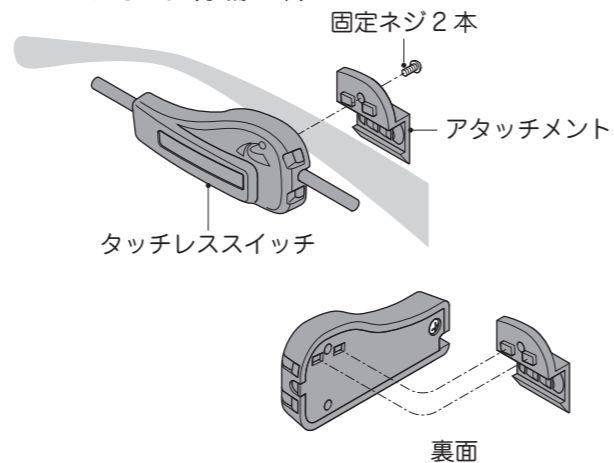


Oリング (標準付属品)

- Oリングを使用して、本体コードをフレームに固定してください。

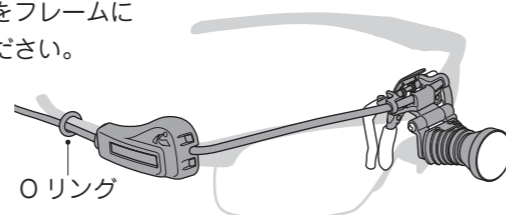


3 バッテリーの接続

- 下図の通りに各コードを接続してください。

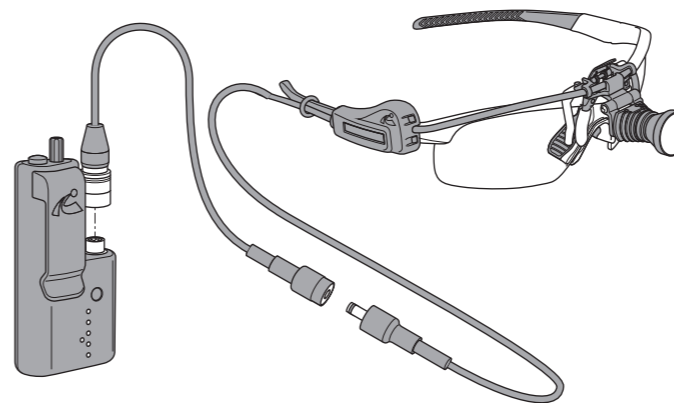


取付け

接続部の凹凸形状を合わせ、カチッと音がするまで差し込みます。

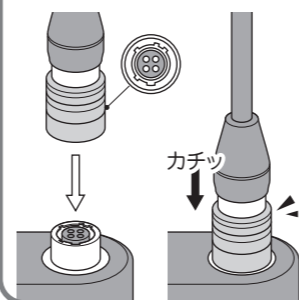

取外し


ソケット部を持ち上げながらコードを抜いてください。

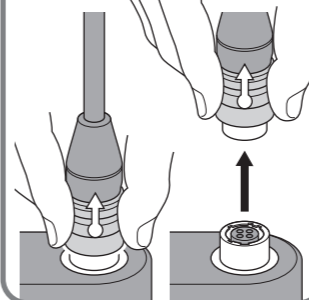

4 バッテリーの充電



バッテリーの充電

- 充電用 AC アダプタに USB ケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。
- USB ケーブルをバッテリー底面の USB Type-C コネクタに接続してください。充電中は充電ランプが赤く点灯します。

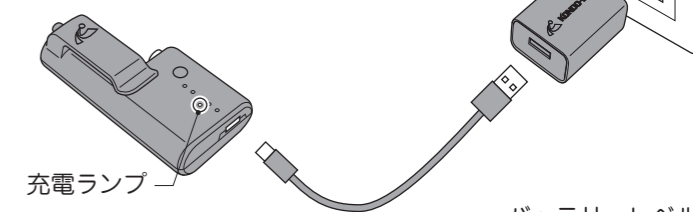



残量確認

- バッテリーレベルインジケータスイッチを押すとインジケータランプが点灯し、充電残量を5段階で表示します。

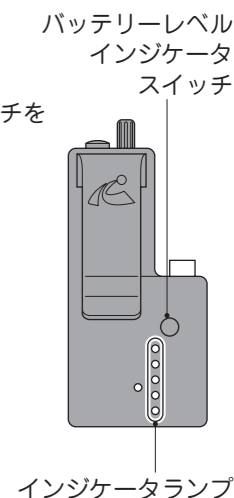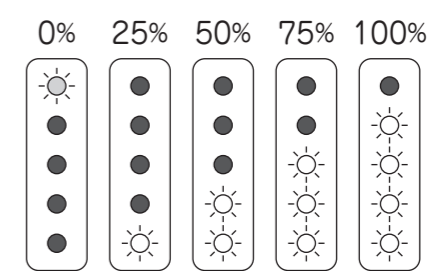

5 ライトの ON/OFF

- バッテリースイッチを ON にした後、タッチレススイッチから 30~100 mm の間で 1 回手を振ると [ON / OFF] になります。

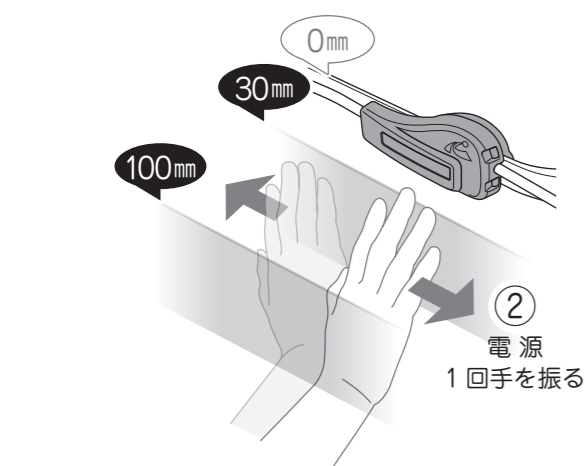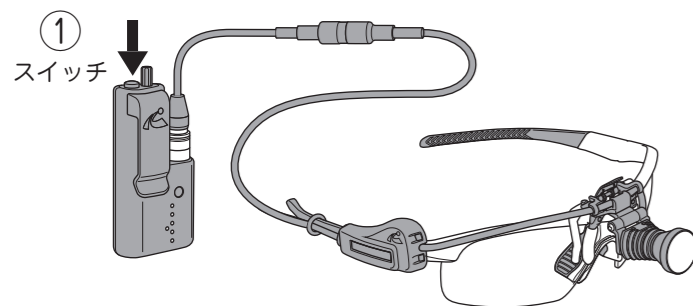


6 照度調整

- 照度調整は 1 回手をかざすことで [アップ/ダウン] できます。
- ※ 再度 [ON] にした場合、前回の設定で起動されます。




タッチレススイッチを使用しない場合

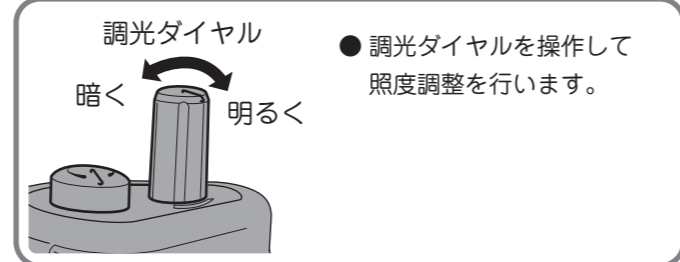


7 照射角度の調整

- ライト本体は、上下・左右に照射角度の調節ができます。

上下の角度調整

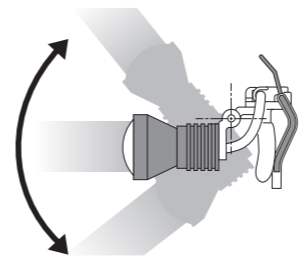


左右の角度調整

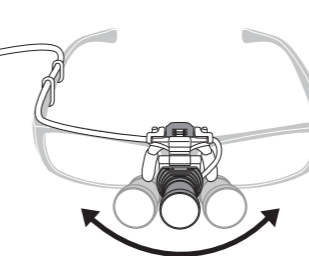

8 ヒンジの緩み調整


- 調整ネジを締めることで、ヒンジの緩みを調整できます。

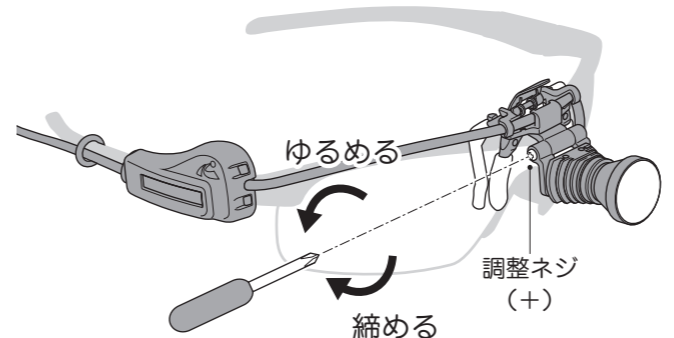

9 ルーペ・調色フィルターを取付け・取外し


ルーペ

- 付属のナット廻し工具を使用して「ルーペプラケット」をルーペに取付けてください。

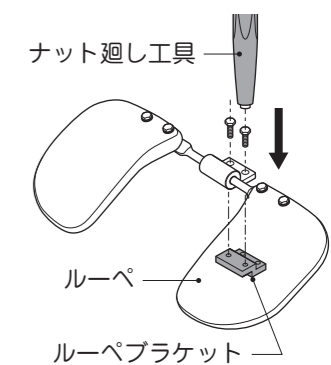

- イルミナ本体にルーペを取付けてください。

【旧モデルのルーペをご使用の場合】
※ 旧モデルのネジは、長さが違うため取付けできません。付属のネジをご使用ください。

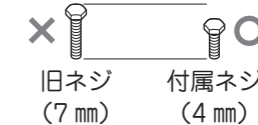

調色フィルター (オプション)

- 矢印の方向にしっかりと差し込んでください。

調色フィルター (オプション)

