

取扱説明書 イルミナ タッチレスシリーズ

シングル MS-701D MS-701S MS-771D MS-771S MS-751D MS-751S

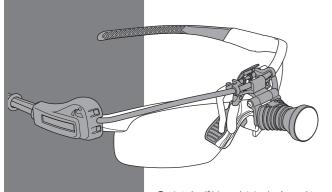

- ●このたびは、イルミナ タッチレスシ リーズをお買い上げいただき、まこと にありがとうございます。
- ●ご使用に先立ち、この取扱説明書を よくお読みのうえ、正しく安全に ご使用ください。
- ●この取扱説明書は大切に保管して ください。

各部の名称

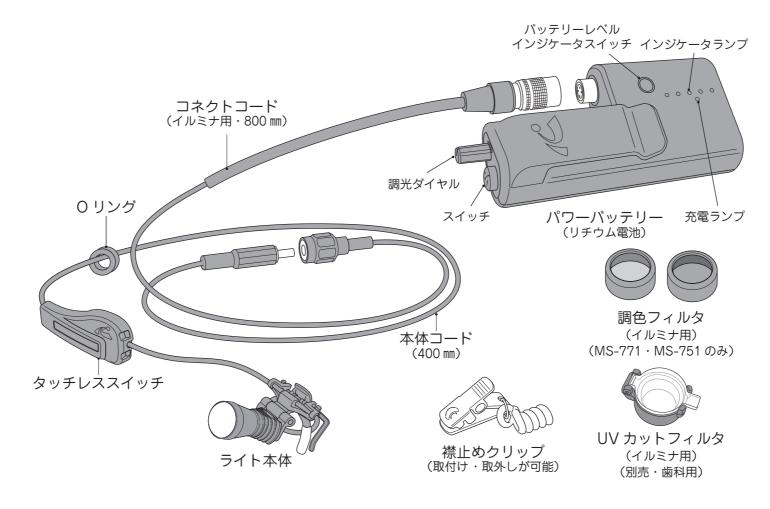

充電用アダプタ USB ケーブル





′ 安全上のご注意 必ずお守りください

事故を未然に防ぐため、ご使用前に本書を必ずお読みください。

小警告

- ●防水構造ではありません。
- 電気ショックを受ける危険性があります。
- 水漏れなどが発生した場合は、直ちにスイッチを切り、電源コードをコン セントから抜いたうえで乾燥した布などで十分に拭き取ってください。
- 内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け、安全 が確認されるまでご使用にならないでください。
- LED 周辺部は温かくなります。
- ライトの角度調整時には注意して行ってください。
- 光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照射しないでください。 目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります。
- 皮膚への損傷を最小限とするために、次の事項を守ってください。
- 皮膚が損傷する危険性があります。
- 1) 照射時間を最小限にしてください。
- 2) 皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により皮膚感度が変化 している場合は特に注意してください。

▲ 禁止

- 本品は可燃性の麻酔ガスなどの状況下では絶対に使用しないでください。 爆発の恐れがあります。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- ・故障の原因となります。
- ●本製品は滅菌などの措置は出来ません。
- 故障の原因となります。
- ※ 付属品などの内容物がそろっていることをご確認ください。 万一、内容物に不足や破損がある場合は、下記までご連絡ください。 (本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

株式会社 近藤研究所

TEL 052-228-3117 FAX 052-228-3116 E-mail mega@kondo-labo.co.jp

仕 様

型式		MS-701D (ダブル)	MS-701S (シングル)	MS-771D (ダブル)	MS-771S (シングル)	MS-751D1 (ダブル)	MS-751S (シングル)		
ルーペ(倍率)		<u> </u>		1.7 倍		1.5 倍			
ルーペ焦点距離		_		250~300 mm		300~400 mm			
	ライト本体	31W×20D×20H mm・9g 53W×36D×34H mm・28g (クリップ含む)							
寸法・質量	ルーペ	_		10W×87D×39H mm⋅8g					
	バッテリー	104W×48.5D×31H mm·92g							
	充電用アダプタ	60W×35D×25H mm·35g							
	USB ケーブル	タイプ C 1000mm							
コード長		1200 mm (本体コード: 400 mm+コネクトコード: 800 mm)							
電源		3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mAh							
光源		3W LED							
照射範囲(距離 350 mm)		90 mm							
調光機能		照度レベル I ~ Ⅲ (無段階)							
照度 (距離 250 mm)		照度Ⅲ:60,000 lux 照度Ⅱ:40,000 lux 照度Ⅰ:30,000 lux							
バッテリー使用時間		照度Ⅲ:240分 照度Ⅱ:400分 照度Ⅰ:570分							
バッテリー充電時間		約 4 時間							

■ セット内容

<u></u>									
品名	型式	MS-701D (ダブル)	MS-701S (シングル)	MS-771D (ダブル)	MS-771S (シングル)	MS-751D1 (ダブル)	MS-751S (シングル)		
ライト本体	MO-3006D(S)								
バッテリー	MS-010A								
充電用アダプタ	MS-030A								
USBケーブル	MS-040A								
コネクトコード (イルミナ用・800 mm)	MS-960A								
ルーペ 1.7(拡大倍率 1.7 倍)	MO-3170	_	_			_	-		
ルーペ 1.5(拡大倍率 1.5 倍)	MO-3150	_	_	-	_				

【 バッテリーについて

● バッテリーについて:

バッテリー電池は、リチウムイオン電池を使用しています。 リチウムイオン電池は継ぎ足し充電をしても、電池の性能 を低下させることはありません。

電池の寿命は、およそ充放電 500 回が目安です。

フル充電しても使用可能時間が極端に短くなった場合は、 電池寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの 状態により大きく変化します。)

バッテリーの配置

● バッテリーを配置する際は、 コードを一度首の後ろを 通していただくと ライトの重さが


軽減され安定します。

● 付属の襟止めクリップを 使用していただくと コードが邪魔に なりません。




ライトの取付け

● ライト本体部のクリップ部を広げ、メガネ・ゴーグル等の レンズを挟み込むように取付けてください。

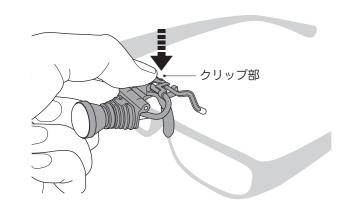

● クリップ部分のツマミを逆に広げると 破損の原因となります。

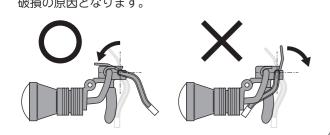



▲ 注 意

2 タッチレススイッチとコードの固定

タッチレススイッチ

● 固定ネジ2本で、タッチレススイッチをフレームに固定し てください。(予備2本)

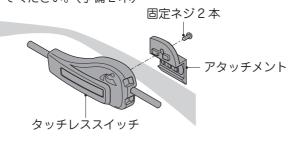

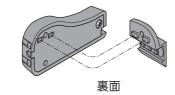


Oリング(標準付属品)

● 0 リングを使用して、 本体コードをフレームに 固定してください。



(3 バッテリーの接続


●下図の通りに各コードを接続してください。

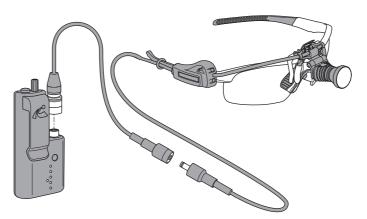

取付け

接続部の凹凸形状を 合わせ、カチッと音が するまで差し込みます。

取外し

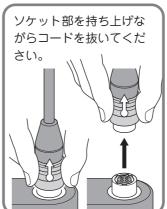

4 バッテリーの充電

バッテリーの充電

● 充電用 AC アダプタに USB ケーブルを接続し、 コンセントに差し込んでください。


● USB ケーブルをバッテリー底面の USB Type-C コネクタに接続してください。 充電中は充電ランプが赤く点灯します。




残量確認


● バッテリーレベルインジケータスイッチを 押すとインジケータランプが点灯し、 充電残量を5段階で表示します。


25% 50% 75% 100%

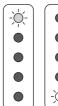



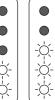

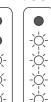

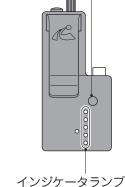


バッテリーレベル


インジケータ

スイッチ

5 ライトの ON/OFF

● バッテリースイッチを ON にした後、タッチレススイッチ から 30~100 mmの間で 1 回手を振ると [ON / OFF] に なります。

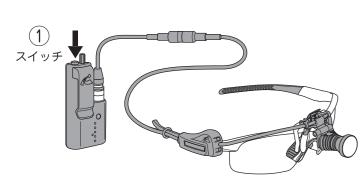


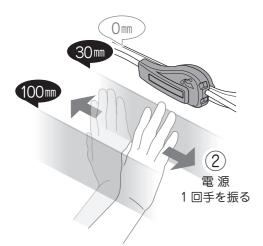

6 照度調整

● 照度調整は1回手をかざすことで[アップ/ダウン]でき ます。

※ 再度 [ON] にした場合、前回の設定で起動されます。

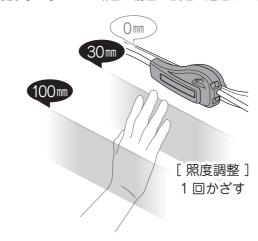


タッチレススイッチを使用しない場合




照射角度の調整

● ライト本体は、上下・左右に照射角度の調節ができます。

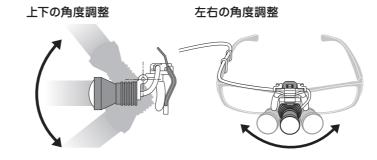

ヒンジの緩み調整

● 調整ネジを締めることで、ヒンジの緩みを調整できます。

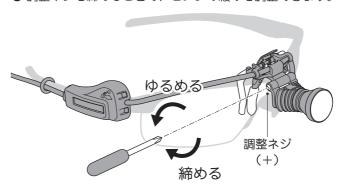

(9 ルーペ・調色フィルターの取付け・取外し

ルーペ

● 付属のナット廻し工具を使用 して「ルーペブラケット」を ルーペに取付けてください。

●イルミナ本体に ルーペを取付けてください。

【旧モデルのルーペをご使用の場合】 ※ 旧モデルのネジは、長さが 違うため取付けできません。 付属のネジをご使用ください。



調色フィルター(オプション)

● 矢印の方向にしっかりと 差し込んでください。

